


I H R E P R O F I - B E H A N D L U N G

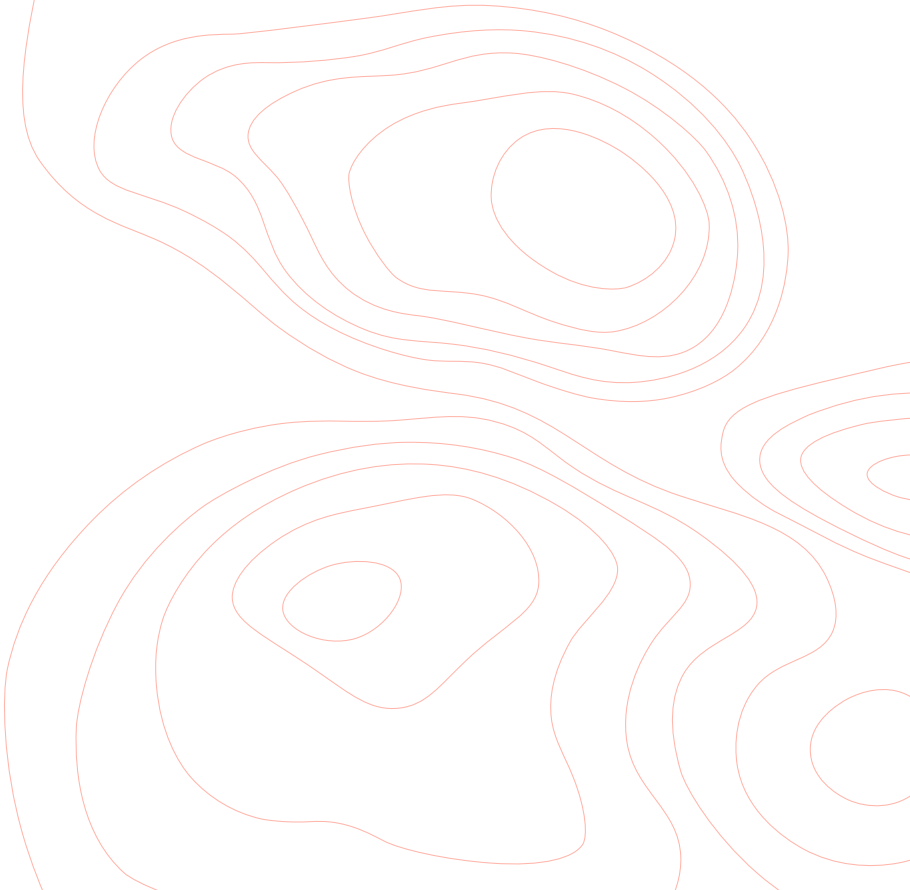







## SKINOLOGY CARE – sanfte und effektive Vibrationsbehandlung

SKINOLOGY ist eine Vibrationsbehandlung und unterstützt die Tiefenstimulation von Haut und Gesichtsmuskulatur in Ihrer Pflegeroutine. Das Gerät vibriert senkrecht bis in die tiefen Hautschichten und ermöglicht auf der Zellebene Effekte, die eine rein manuelle Massage nicht erzielen kann. Das Behandlungsgerät arbeitet kosmetische Präparate wie Seren in die Haut ein. Dadurch regt es Regenerationsprozesse an und erlaubt mit verschiedenen Aufsätzen eine weiterführende Behandlung, zum Beispiel zur Entspannung der Mimik-Muskulatur.



# 1



## SCHRITT 1 Vorbereitung der Haut

Reinigung der Haut  
z.B. mit SKNLGY best preparation unlimited CLEANSER

Altes Zellmaterial entfernen  
z.B. mit SKNLGY beauty skin activator



# 3



## SCHRITT 3 Behandlungsabschluss

Tragen sie abschließend eine Tagespflege oder ein Make-up auf, um mit einem belebten Hautgefühl in den Tag zu starten. SPF ist immer empfehlenswert.

Führen Sie die Behandlung am Ende des Tages durch, tragen Sie nun abschließend eine Nachtpflege auf. So verhelfen Sie Ihrer Haut durch die regenerativen Prozesse in der Nacht.

# So gestalten Sie die SKINOLOGY Profi-Behandlung



## SCHRITT 2

### Vibrationsbehandlung

Sollten Sie noch keine Erfahrung mit einer Intensivbehandlung haben, starten Sie mit der niedrigsten Intensität und steigern Sie diese nach und nach.

Die empfohlene Massagerichtung ist immer von innen nach außen und von unten nach oben.

**T I P P** Das Gerät nur auflegen, keinen zusätzlichen Druck ausüben – das Eigengewicht des Geräts erzeugt ausreichend Druck und der Schwingteller kann frei und intensiv arbeiten.

**T I P P** Nutzen Sie die Penetrationswirkung der Schallwelle und tragen Sie zuvor ein Serum, eine Maske oder eine Intensiv-Creme (zum Beispiel SKNLGY perfect youth und/oder SKNLGY beauty push-up) auf und arbeiten Sie diese gleich mit ein!

Wie Sie die Behandlung im Detail durchführen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Sie gehen dabei nach sechs Zonen vor. Beachten Sie bitte diese Behandlungssymbole:



Behandlungsdauer



Intensität




Aufsatz



Frequenz




1

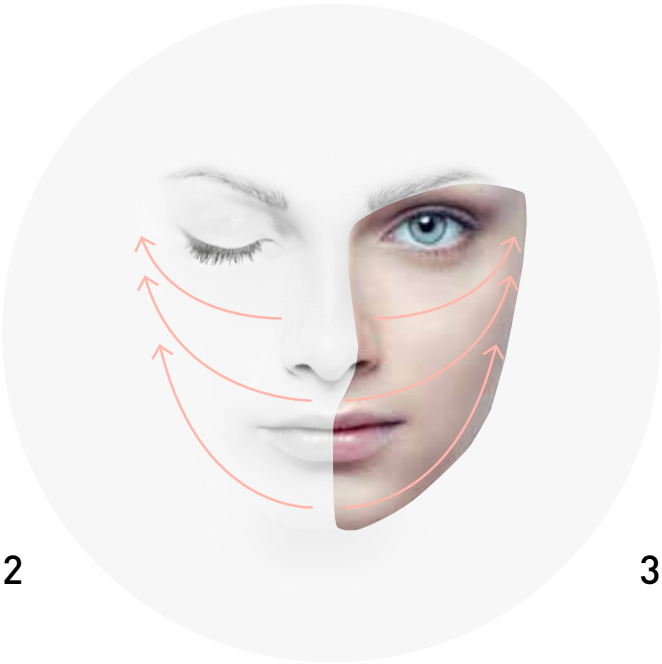

2

3





## ZONE 1

### Start der Behandlung



1 Minute



mittel/hoch




Telleraufsatz



100 Hz

Bitte legen Sie Ohrringe oder Ohrstecker ab. Bei Berührung mit dem Aufsatz entsteht sonst ein unangenehmes Geräusch. Achten Sie beim Bearbeiten der Kieferzone ggf. darauf, dass die Zähne nicht aufeinander liegen und die Zunge locker am Gaumen aufliegt.

Starten Sie an der rechten Schulter bzw. Halsseite und beginnen Sie, den Hals zu behandeln. Dabei ziehen Sie die Bahnen in einer langsamen Aufwärtsbewegung und in einer schnelleren Abwärtsbewegung. Falls Sie hier mit niedriger Intensität starten möchten, versuchen Sie, diese innerhalb dieser Zone zu steigern.



## ZONE 2 UND 3

### 2 Rechte Kinn- und Wangenregion

### 3 Linke Kinn- und Wangenregion



PRO ZONE 4 Minuten



mittel/hoch





Telleraufsatz



100 Hz

Beginnend in der Kinnmitte ziehen Sie wie am Hals gleichmäßige Bahnen. Bewegen Sie das Gerät langsam von der Mitte zur Seite und schneller wieder zurück, um die neue Bahn beginnen zu können. Die Aufwärtsbewegung sollte immer intensiver sein!

In den Zonen mit dünnerer Haut bzw. Gewebe können Sie bei Bedarf die Intensität reduzieren.

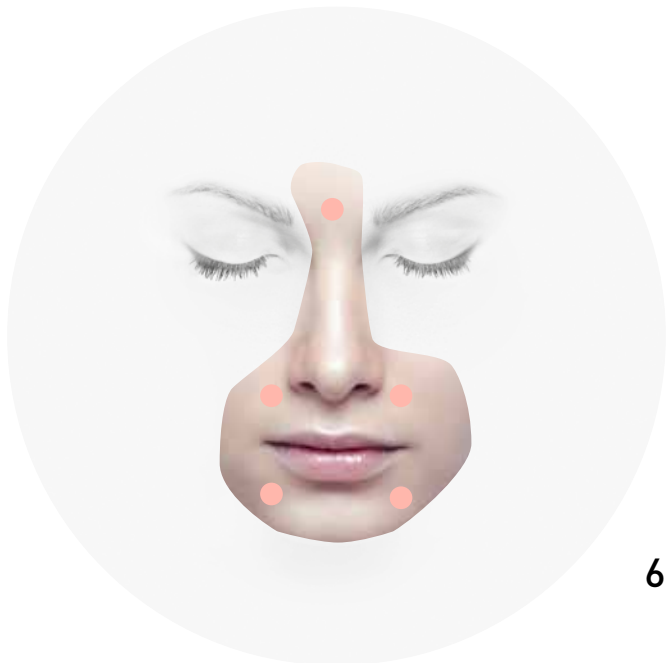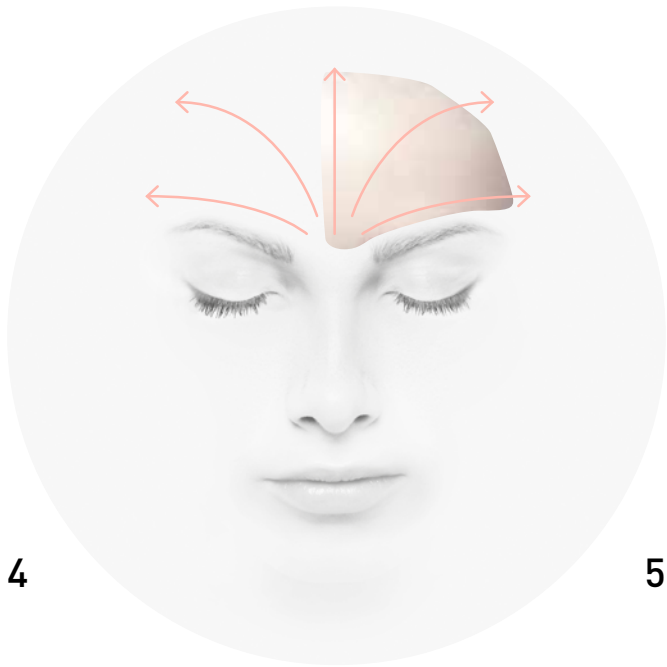

## ZONE 4 UND 5

### 4 Rechter Stirn- und Schläfenbereich

### 5 Linker Stirn- und Schläfenbereich

 PRO ZONE 3 Minuten  mittel

 Telleraufsatz  100 Hz

Wechseln Sie nun in fließenden Bewegungen vom Wangenbereich zu Schläfen und Stirn. Arbeiten Sie von der Glabella/Zornesfalte ausgehend von der Mitte zu den Seiten in langsamen und intensiven Bahnen zu den Schläfen hin. In streichender Bewegung kehren Sie zurück, um die nächste Bahn bis zum Haaransatz abzu- arbeiten. Auch hier dürfen Sie bei Bedarf die Intensität bzw. Dauer der Behandlung in dieser empfindlichen Zone anpassen. Die Behandlung soll sich zu jeder Zeit angenehm anfühlen.

## ZONE 6

### Bearbeitung der tieferen Falten wie Marionett, Nasolabial, Perioral, Glabella

 5 Minuten  mittel/hoch

 Kugelaufsatz  50 Hz

In langsamen, kreisenden Bewegungen bearbeiten Sie nun die Falten an Mund und Nase, beginnend bei den Marionettenfalten bis hinauf zur Zornesfalte. Hierbei werden die stärker ausgeprägten Falten mit dem Kugelaufsatz intensiv und wiederholt nachgezeichnet, um die darunterliegende Muskulatur zu tonisieren, die Durchblutung anzuregen und die Wirkstoffaufnahme in den betroffenen Zonen besonders zu erhöhen. Bei Bedarf tragen Sie zwischendurch Serum nach. Die Intensität hängt von der Zone und der Empfindung ab.

**myskinology.de**  
info@myskinology.de  
+49 (0)7151 133 97 17

NOVAFON GmbH  
Daimlerstr. 13  
71384 Weinstadt

